

# POSE DU SPARADRAP « FFP2 TAPE NOSE »

## Quel sparadrapp ?

- Du sparadrapp médical d'une largeur  $\geq 2,5$  cm
- qui adhère bien à la peau, sans l'irriter lorsqu'on l'enlève
- suffisamment étanche à l'air
- IDEWE utilise Omnifilm 2,5 cm X 5 m pour le test ATP – utilisez un sparadrapp similaire



## Comment le poser ?

- Placez le masque et appliquez le pince-nez selon la forme de votre nez.
- Étape 1 : Collez le sparadrapp à partir des joues vers le nez (il peut passer au-dessus de la bride) en recouvrant la partie supérieure du nez. Veillez à ce que la largeur du sparadrapp recouvre pour moitié le bord du masque et pour moitié la peau.
- Étape 2 : Pressez correctement le sparadrapp sur le bord du masque et sur la peau, spécialement sous les coins des yeux (fermés).

## Comment l'enlever ?

- Désinfectez-vous d'abord les mains.
- Enlevez le masque en saisissant les brides et en tirant d'un côté du visage ; normalement, le sparadrapp se décolle avec le masque.
- Ne touchez pas le masque ou le sparadrapp avec les mains.
- Jetez le masque dans la poubelle appropriée.
- Désinfectez-vous ensuite les mains.

# POSE DU SPARADRAP « FFP2 TAPE NOSE »



Étape 1 : Collez une bande de sparadrap sur la peau de la joue, en recouvrant le bord du masque, jusqu'au haut du nez, tant à gauche qu'à droite (les deux bandes de sparadrap se chevauchent sur le nez).



Étape 2 : veillez à ce que le sparadrap adhère bien à la peau de chaque côté du nez sous les coins des yeux. Appuyez sur la peau et sur le bord du masque.

